



INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCION:

Oleeva Clear y Oleeva Fabric son hojas adhesivas de silicón utilizadas para reducir o prevenir cicatrices hipertróficas y queloides.

USO:

El uso consistente de Oleeva puede minimizar o ayudar en la prevención de cicatrices hipertróficas y queloides existentes.

INSTRUCCIONES:

PASO 1: Remueva el producto del empaque. Para cobertura completa, recomendamos que no altere el tamaño del producto; si es necesario puede cortar con tijeras el exceso de producto.

PASO 2: Retire el papel protector y guárdelo para usarlo después. Coloque la parte pegajosa del producto hacia abajo, directamente sobre la cicatriz. El área de la cicatriz debe estar completamente sana antes de colocar el producto. Puede usar la hoja o parcho de Oleeva por lo menos 12 horas y hasta 23 horas al día.

PASO 3: Lave el área de la cicatriz al menos una vez al día. También debe lavar el parcho una vez al día con agua tibia y jabón suave. No use jabones que tienen lociones o aceites. Puede usar el jabón de Bio Med, Silicone Gel Cleanser. Enjuague el parcho u hoja para remover toda traza de jabón. Permita que el producto se seque al aire o puede aplicar el Oleeva a su piel aunque este mojado, pero seque la parte posterior con un paño o toalla que no deje residuo pegado en al parcho. Entre usos, guarde el parcho en el papel protector en que vino.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

No use cremas, lociones o ungüentos con este producto porque puede interferir con su efectividad o causar irritación de su piel.

PRECAUCION:

Como cualquier otro producto tópico aplicado directamente a la piel, podría presentarse algún tipo de reacción (usualmente irritación). Pare de usar el producto si tiene algún tipo de reacción. Cuando su piel haya regresado a su estado normal, usted puede comenzar a reaplicar Oleeva por períodos cortos de tiempo y gradualmente aumentar horas de uso. Observe el área para signos de reacción. Continúe aumentando el tiempo de uso hasta que alcance el máximo recomendable. Si usted continua teniendo problemas, para de usarlo y consulte con su medico.

ADVERTENCIA!

NO LO UTILICE EN HERIDAS ABIERTAS.



Pelegrina Medical Inc
419 Calle José De Diego San Juan PR 00923
www.PelegrinaMedical.com
T.787-761-0000 F. 787-761-0404
E. Sales@pelegrina.com